

Viscoplast™



MEDYCZNE

Preparat do oczyszczania ran

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Przeznaczenie: do oczyszczania, splukiwania i nawilżania

- a) powierzchniowych ran (np. skaleczenia skóry, pogryzienia, rany cięte, otarcia, pęknięcia skóry, zmiżdżenia)
- b) powierzchniowych poparzeń.

Właściwości: przyspiesza gojenie dzięki optymalnemu oczyszczeniu rany. Redukuje w ten sposób powstawanie blizn oraz nieprzyjemnego zapachu. Zapobiega zakażeniom rany i powstawaniu biofilmu. Chroni przed drobnoustrojami opornymi na antybiotyki (MRSA, VRE, ESBL). Ułatwia usuwanie zaschniętych opatrunków podczas ich wymiany poprzez zwilżenie przed usunięciem. Zmniejsza ból. Bezbolesna aplikacja. Niedrażniący i dobrze tolerowany. Nie hamuje ziarninowania i naskórkowania. Dermatologicznie przebadany. Kompatybilny z materiałami, z których wykonane są cewniki, sondy.

Wskazówki dotyczące stosowania: Oczyszczenie i pielęgnacja ran i poparzeń: W celu oczyszczenia i splukania nanieść preparat na całą powierzchnię rany i jej otoczenie. Zmniejsza to ryzyko zakażenia i stwarza optymalne warunki dla procesu gojenia. Następnie przykryć ranę opatrunkiem. Opatrunki zaschnięte, pokryte strupem można zwilżyć preparatem do oczyszczania ran, aby ułatwić ich usuwanie i zmniejszyć ból w trakcie zdejmowania.

Środki ostrożności:

- Tylko do stosowania zewnętrznego na rany. Nie stosować do infuzji ani wstrzykiwań. Nie połykać.
- W bardzo rzadkich przypadkach bezpośrednio po naniesieniu preparatu do oczyszczania ran może wystąpić lekkie pieczenie na powierzchni rany, które jednak ustępuje po kilku minutach.
- Preparat do oczyszczania ran może wywoływać reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka ze swędzeniem i wysypka skórna. Bardzo rzadko (mniej niż u 1 pacjenta na 10 000) zgłaszano reakcje alergiczne, takie jak wstrząs anafilaktyczny.
- Preparatu do oczyszczania ran nie wolno stosować w przypadku znanych alergii lub podejrzenia alergii na jakikolwiek jego składnik.
- Preparatu do oczyszczania ran nie wolno stosować w obrębie OUN, opon mózgowych, w uchu środkowym i wewnętrznym, na oku lub tkance chrząstnej szklistej.

- Unikać inhalowania preparatu do oczyszczania ran.
- Nie stosować w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi, ponieważ mogą one wykazywać interakcje z poliheksanidyną.
- Ze względu na brak doświadczeń klinicznych u kobiet w ciąży, kobiet karmiących, noworodków i małych dzieci preparat do oczyszczania ran należy stosować tylko po rozważeniu przez lekarza ryzyka względem korzyści.
- Nie stosować produktu w przypadku uszkodzonych opakowań.
- Butelkę, która zetknęła się z raną, po użyciu należy wyrzucić.
- Jeżeli wystąpi obrzęk, zaczerwienienie lub ból rany, bądź gdy rana nie zaczyna się goić w ciągu kilku dni, należy zgłosić się do lekarza.
- Nie stosować bez przerwy dłużej niż 30 dni.

Wskazówki dotyczące przechowywania:

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Przydatność do użycia 24 miesiące.
- Zużyć w ciągu 12 miesięcy od otwarcia.
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Wyrób medyczny – Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład / dane techniczne: Zawiera Prontosan® Wound Spray: woda oczyszczona, powierzchniowo czynna betaina, 0,1% poliaminopropylu biguanidyny (poliheksanidyna).

Wygląd i zapach: klarowny, bezbarwny i prawie bezwonny roztwór wodny.

Dystrybucja:

3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117,
Kajetany 05-830 Nadarzyn



B. Braun Medical AG,
Seesatz 17, CH-6204 Sempach
Wyprodukowano w Szwajcarii
PRONTOSAN®, znak towarowy B. Braun

CE 0344

Objaśnienia:



Uwaga, zapoznaj się z ulotką.



Data ważności:
YYWWDMXX

YY: Rok
WW: Tydzień
D: Dzień tygodnia
M: Kod producenta
XX: Kolejny numer



Numer serii
YYYY-MM
Rok-Miesiąc



Przechowywać poza zasięgiem dzieci



Numer katalogowy



Chronić przed światłem słonecznym



Wytwórca



Czas przydatności do użycia po otwarciu



Produkt niejadalny (niesterylny)